

FAQ – ANTI-BRUMM® Tique-test

Où puis-je acheter le tique-test?

En droguerie et en pharmacie, en Suisse.

Ma pharmacie/droguerie n'a pas de tique-test. Que dois-je faire?

Toute pharmacie/droguerie a la possibilité de commander le tique-test. Les Pharmacodes sont:

AL	4773868
FR	4773874
IT	4773880

Saisie de votre numéro de test

Il suffit d'indiquer votre numéro de test sans «ch000». Si vous avez des problèmes lors de la saisie de votre numéro de test, veuillez nous contacter par téléphone.

Je n'arrive pas à accéder au résultat de mon tique-test.

Si la saisie de votre mot de passe fait apparaître la remarque «mot de passe invalide», il pourrait s'agir d'une confusion entre lettres et chiffres.

Dans ce cas, veuillez contrôler les options suivantes:

I = i majuscule ou L minuscule

O = o majuscule ou zéro

Si la remarque «mot de passe invalide» persiste, nous vous prions de prendre contact avec nous, soit par téléphone, soit à l'aide du formulaire de contact.

Dans quelle mesure la tique doit-elle avoir été fraîchement prélevée? Puis-je également envoyer une tique morte?

La présence de borrélioses peut être détectée quasiment sans limitation de temps. Le matériel génétique des borrélioses, analysé dans la tique, est extrêmement stable et peut également être détecté dans les tiques mortes.

Des tiques mortes depuis cinq ans ont déjà été analysées. De bons résultats ont tout de même pu être obtenus.

Puis-je également envoyer une tique incomplète?

Il arrive que, lorsque la tique est enlevée, la pièce buccale ou même toute la tête reste coincée dans la peau. L'expérience montre que, pour pouvoir réaliser le test, il suffit de nous envoyer le corps de la tique.

Que signifie un résultat négatif et que faut-il faire ensuite?

Cela signifie qu'aucune borréliose n'a été détectée dans la tique envoyée.

Dans ce cas, le site de la piqûre et l'état de santé général devraient toutefois être surveillés, car il n'est pas exclu que des borrélioses soient transmises par d'autres tiques, qui sont passées inaperçues. Plus rarement, d'autres agents pathogènes, comme le virus MEVE, pourraient également avoir été transmis. En cas d'apparition d'éventuels symptômes, il convient de consulter rapidement un médecin.

Résultat positif - que faire?

Un résultat positif signifie que des borrélioses ont été détectées dans la tique envoyée. Le résultat ne permet toutefois pas de savoir si les agents pathogènes ont été transmis à l'être humain. Un résultat positif vous permet de mieux pouvoir évaluer d'éventuels symptômes. En effet, les symptômes d'une borréliose sont variés, non spécifiques et parfois changeants. Nous vous recommandons de consulter votre médecin dès que possible si des symptômes venaient à apparaître.

Le résultat devrait aider le médecin à évaluer le risque qu'une transmission de borrélioses ait eu lieu.

Plus rapidement les éventuels symptômes sont expliqués, plus rapidement le traitement pourra être instauré, et le risque de conséquences tardives pourra ainsi être réduit. La pratique montre que les borrélioses ne sont souvent diagnostiquées que tardivement.

Quels sont les symptômes typiques d'une borréliose?

La borréliose se manifeste sous la forme de tableaux cliniques très variés. Le premier signe de la maladie est souvent une inflammation localisée de la peau au site de la piqûre, une «rougeur migrante» (Erythema migrans), qui se développe sous forme de cercles autour du site de la piqûre. La rougeur migrante n'apparaît toutefois que chez près d'une moitié des personnes atteintes! En même temps, des symptômes grippaux (fièvre, fatigue, céphalées) peuvent être présents.

Des semaines voire des mois plus tard, d'autres organes peuvent être touchés. Il s'agit souvent des articulations (surtout les genoux), du système nerveux (méninges, cerveau, nerfs faciaux), de la peau (gonflements, etc.) et, plus rarement, du cœur. Lorsque la borréliose n'est pas reconnue à temps puis traitée correctement, des lésions chroniques (p. ex. arthroses, atrophies cutanées, modifications de la personnalité) peuvent persister. En raison des symptômes variés et changeants, le diagnostic peut être difficile à poser.

La tête de la tique a été arrachée et est restée dans le corps. Que dois-je faire?

Désinfectez bien le site. D'éventuels restes devraient être éliminés par un médecin si le corps ne parvient pas à s'en débarrasser de manière naturelle au cours des jours suivants.

Les caisses-maladie remboursent-elles le tique-test?

Les caisses-maladie ne remboursent pas les coûts du tique-test.

Où l'analyse est-elle réalisée?

L'analyse se fait dans un laboratoire suisse reconnu.

L'anonymat de mes données est-il respecté?

Vos données restent de toute façon anonymes et ne sont pas transmises à des tiers.